
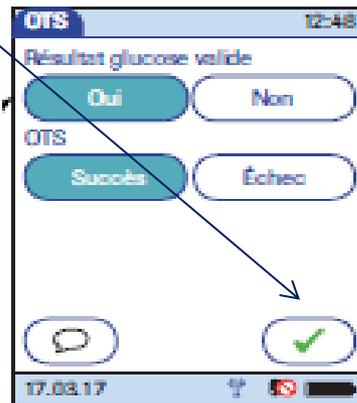


OTS : Test patient sous observation

1. Saisir votre ID d'utilisateur
2. Appuyer sur  **Test Patient**
* le bouton *Test de glucose* est désactivé jusqu'à ce que l'observateur ouvre une session
3. Remettre le lecteur à l'observateur. (**Super utilisateur**)
4. L'observateur appuie sur  **Connex. observateur** et saisi son ID d'utilisateur
Le Menu *Test Patient* s'affiche de nouveau. Le bouton *Test de glucose* est maintenant activé.
5. L'utilisateur peut alors appuyez sur  **Test de glucose** et effectuez le test patient.
6. Appuyer sur le crochet pour valider le résultat et remettre le lecteur à l'observateur.
7. L'observateur appuis sur le crochet pour se connecter de nouveau. (ID)

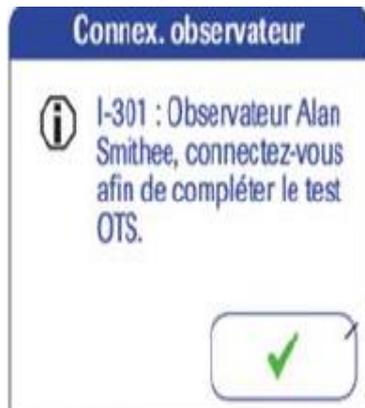

Il évalue la validité du résultat du test en appuyant sur *Oui ou Non*

Il évalue la technique de l'utilisateur en appuyant sur *Succès ou Échec*.

Il faut remettre le glucomètre sur le socle pour une synchronisation. (Synchronisation BDD)