

Solutions de contrôle permettant d'évaluer la qualité du système Accu-Chek® Inform II

- CQ niveau 1 (niveau bas)
- CQ niveau 2 (niveau élevé)
- Doivent être entreposées entre **10° à 30°C**.
- Les solutions de contrôle expirent 3 mois après leur ouverture;
- **Inscrire la date dès l'ouverture de nouvelles bouteilles**
- Avant l'utilisation, **inverser la bouteille** de contrôle à quelques reprises.
- **Jeter la 1ère goutte de solution à chaque utilisation**



Bandelettes-test

- Dans leur flacon d'origine seulement contenant un dessiccateur favorisant la conservation du produit
- Entre 10-30°C, loin des éléments de chauffage, fenêtres (voiture, SAD) et des endroits humides
- Ne pas congeler (voiture, SAD)
- Ne jamais transférer d'un contenant à un autre
- Jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le flacon indépendamment de la date d'ouverture.
- Doit être utilisé aussitôt qu'elle est retirée du flacon.
- Bien remplir la fenêtre jaune, en une seule tentative, en appliquant la goutte de sang à l'extrémité de la bandelette.
- Toujours appliquer la goutte de sang à l'extrémité de la bandelette-test et non sur le dessus de celle-ci, la goutte est transférée par capillarité.

